

## Brugsanvisning - Dansk (DA)

### Til PrimePad skridsikre underlag til operationsstuer



[www.PM-eifu.com](http://www.PM-eifu.com)

**Beskrivelse:** PrimePad er et skridsikert patientpositioneringsunderlag, der giver trykreduktion og patientstøtte for at sikre, at patienten forbliver immobil under en medicinsk procedure. Disse underlag fås i en række forskellige størrelser, former og sæt.

**Tilsigtet brug:** PrimePad skridsikre underlag er beregnet til at støtte og stabilisere en patient eller dennes kropdele i en ønsket position på et kirurgisk lege under en medicinsk procedure. Nogle af anordningerne er beregnet til at forhindre, at patienten glider i Trendelenburg-stillingen, eller når der anvendes træk.



#### Advarsler og forholdsregler:

- Udstyret må kun anvendes af autoriseret sundhedspersonale.
- Følg altid hospitalets protokoller for patientpositionering og overvågningsfrekvens.
- Må ikke anvendes, hvis emballagen er beskadiget.
- Der må ikke placeres nogen genstande mellem udstyret og operationsbordet.
- Længerevarende eksponering af polyurethanskum for temperaturer på over 115 °C (240 °F) kan medføre afgivelse af flygtige bestanddele, derfor må skummet ikke udsættes for høje temperaturer.

#### Begrænsninger og kontraindikationer:

- Udstyret er kontraindiceret til brug til patienter, der kan være følsomme over for polyurethanskum.



#### Vejledning:

1. Før brug af udstyret skal det sikres, at operationsbordets madras er ren, tør og sikkert fastgjort til operationsbordet.
2. Placer underlaget på bordet, så underlaget og madrassens perineale udskæringer flugter. Sørg for, at der ikke er nogen genstande mellem operationsbordets madras og PrimePad.
3. Placer patienten som påkrævet i forbindelse med proceduren. Maksimal patientkontakt med underlaget er vigtig for effektivitet under proceduren. Minimer bredden af løfte- eller trækklagen for at maksimere patientens kontakt med underlaget. Sørg for, at patientens korsben, torso og skuldre er i direkte kontakt med underlaget. En lille skum- eller gelrulle anbefales til intraoperativ positionering af patientens hoved. Hvis der bruges en pude, skal det sikres, at patientens skuldre er i kontakt med underlaget i stedet for med puden.
  - Kun underlag med fastgørelsesremme: De indbyggede fastgørelsesremme skal være på underlagets underside. Skub remmene nedad mellem rælingen og bordet. Før dem tilbage op og rundt om siden af rælingen, og fastgør remmen sikkert til sig selv igen.
4. Bortskaf underlagene efter brug.

**Indhold:** Produktet leveres ikke-sterilt og er beregnet til at blive brugt til én patient. Må ikke genbruges. Produktet er fremstillet af fleksibelt polyurethanskum. Produktet indeholder ikke latex.

**Rengøring:** PrimePads er ikke blevet valideret til brug med kemiske rengørings- eller desinfektionsmidler.

**Opbevaring:** Når de ikke er i brug, skal de opbevares på et køligt, tørt sted væk fra direkte sollys.

**Bortskaffelse:** Underlagene skal bortskaffes i overensstemmelse med lokale, regionale, nationale og/eller internationale bestemmelser.

**Meddelelse til bruger og/eller patient:** I tilfælde af en uønsket hændelse relateret til udstyret skal udstyret fjernes og hændelsen indberettes til producenten.

**Etiketsymboler:** Symbolerne anvendt på produktetiketten eller i produktlitteraturen er defineret i symbolforklaringen på dette hyperlink: [www.PM-eifu.com/symbols](http://www.PM-eifu.com/symbols)



**Prime Medical, LLC**  
1410 E. Weisgarber  
Knoxville, TN 37909 USA  
[www.PrimeMedicalLLC.com](http://www.PrimeMedicalLLC.com)  
+1 877-434-2021

EC REP

**QNET B.V.**  
P.O. Box 10110  
NL-5160 GA Oisterwijk  
Kantstraat 19,  
5076 NP Haaren  
The Netherlands  
EAR@ce-mark.com

UK  
CA

**QNET LTD.**  
Livingstone House  
309 Harrow Road  
Wembley, Middlesex  
HA9 6BD,  
United Kingdom  
UKRP@medical-risk.com

CH REP

**QNET CH-REP GmbH**  
Im Buel 15  
Postfach 1558  
8750 Glarus  
Switzerland  
CH-REP@medical-risk.com

**Denne brugsanvisning (IFU) gælder for følgende PrimePad-modelnumre.**

**PrimePad/Plus-1:** Skridsikkert underlag med perinealudskæring, 44"x23"x1" (111,76 cm x 58,42 cm x 2,54 cm).

**PrimePad/Plus-1S:** Skridsikkert underlag m/perinealudskæring m/fastgørelsesremme, 44"x23"x1" (111,76 cm x 58,42 cm x 2,54 cm).

**PrimePad/Plus-2:** 2" (5,08 cm) Skridsikkert underlag med perinealudskæring, 44"x23"x2" (111,76 cm x 58,42 cm x 5,08 cm).

**PrimePad/Plus-2S:** 2" (5,08 cm) Skridsikkert underlag m/perinealudskæring m/fastgørelsesremme, 44"x23"x2" (111,76 cm x 58,42 cm x 5,08 cm).

**PrimePad/Plus-3:** Gradueret 1" (2,54 cm) til 2" (5,08 cm) skridsikkert underlag m/perineal udskæring, 44"x23"x2" (111,76 cm x 58,42 cm x 5,08 cm).

**PrimePad/Plus-3S:** Gradueret 1" (2,54 cm) til 2" (5,08 cm) skridsikkert underlag m/perineal udskæring, fastgørelsesremme, 44"x23"x2" (111,76 cm x 58,42 cm x 5,08 cm).

**PrimePad/Plus-W1:** Skridsikkert underlag m/integreret 24"x24" (60,96 cm x 60,96 cm) armstøtter/beskyttelse, perineal udskæring, fastgørelsesremme, 44"x23"x1" (111,76 cm x 58,42 cm x 2,54 cm).

**PrimePad/Plus-W2:** Skridsikkert underlag m/integreret 24"x16" (60,96 cm x 40,64 cm) armstøtter/beskyttelse, perineal udskæring, fastgørelsesremme, 44"x23"x1" (111,76 cm x 58,42 cm x 2,54 cm).

**PrimePad/Plus-K1:** Skridsikkert underlag m/perineal udskæring m/fastgørelsesremme, enkelt remsæt til kropsbrug, 44"x23"x1" (111,76 cm x 58,42 cm x 2,54 cm).

**PrimePad/Plus-K2:** Skridsikkert underlag m/perineal udskæring m/fastgørelsesremme, enkelt remsæt til kropsbrug, engangs trækklagen, 44"x23"x1" (111,76 cm x 58,42 cm x 2,54 cm).

**PrimePad/Plus-K3:** Skridsikkert underlag m/perineal udskæring m/fastgørelsesremme, enkelt remsæt til kropsbrug, to armstøtter, 44"x23"x1" (111,76 cm x 58,42 cm x 2,54 cm).

**PrimePad/Plus-K4:** Skridsikkert underlag m/perineal udskæring, hoved/skulderpositionering, enkelt remsæt til kropsbrug, to armstøtter, 44"x23"x1" (111,76 cm x 58,42 cm x 2,54 cm).

**PrimePad/Plus-K5:** 2" (5,08 cm) Skridsikkert underlag m/perineal udskæring, hoved/skulderpositionering, enkelt remsæt til kropsbrug, to armstøtter, 44"x23"x2" (111,76 cm x 58,42 cm x 5,08 cm).

**PrimePad/Plus-K6:** Skridsikkert underlag m/perineal udskæring m/fastgørelsesremme, enkelt remsæt til kropsbrug, engangs trækklagen, to armstøtter, 44"x23"x1" (111,76 cm x 58,42 cm x 2,54 cm).

**PrimePad/Plus-K7:** Skridsikkert underlag m/perineal udskæring m/fastgørelsesremme, enkelt remsæt til kropsbrug, engangs trækklagen, to armstøtter, hovedstøtte, 44"x23"x1" (111,76 cm x 58,42 cm x 2,54 cm).

**PrimePad/Plus-K8:** Skridsikkert underlag m/integreret 24"x16" (60,96 cm x 40,64 cm) armstøtter/beskyttelse, perineal udskæring, fastgørelsesremme, enkelt remsæt til kropsbrug, engangs trækklagen, hovedstøtte, 44"x23"x1" (111,76 cm x 58,42 cm x 2,54 cm).

**PrimePad/Plus-K9:** Skridsikkert underlag m/perineal udskæring m/fastgørelsesremme, engangs trækklagen, 44"x23"x1" (111,76 cm x 58,42 cm x 2,54 cm).

**PrimePad/Plus-K10:** 2" (5,08 cm) Skridsikkert underlag m/perineal udskæring m/fastgørelsesremme, enkelt remsæt til kropsbrug, engangs trækklagen, 44"x23"x2" (111,76 cm x 58,42 cm x 5,08 cm).

**PrimePad/Plus-PED:** Skridsikkert underlag til børn, 24"x20"x1" (60,96 cm x 50,80 cm x 2,54 cm).

**PrimePad/Plus-SQ1:** Firkantet positioneringsskum 12"x12"x1" (30,48 cm x 30,48 cm x 2,54 cm).

**PrimePad/Plus-SQ2:** 2" (5,08 cm) Firkantet positioneringsskum 12"x12"x2" (30,48 cm x 30,48 cm x 5,08 cm).

**PrimePad/Plus-BBO:** Sækkepudebetræk, 40"x38"x1" (101,60 cm x 96,52 cm x 2,54 cm).

**PrimePad/Plus-CVP:** Kardiovaskulært underlag, 72"x23"x1" (182,88 cm x 58,42 cm x 2,54 cm).